

OMRON

Máy xông khí dung

Model **NE-C101**

Hướng dẫn sử dụng nhanh



- Trước khi sử dụng lần đầu tiên:**
- I) Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
 - II) Tháo rời, vệ sinh và tẩy trùng các bộ phận


Vệ sinh và tẩy trùng

Vệ sinh

Vệ sinh các bộ phận trước khi sử dụng lần đầu tiên và sau mỗi lần sử dụng để loại bỏ thuốc còn sót lại. Việc này để tránh xông không hiệu quả hoặc tránh nhiễm bệnh.


Các bộ phận có thể rửa được

- **Bầu xông khí dung, Mặt nạ (PVC), Ống mũi, Ống ngậm**
Rửa các bộ phận này bằng nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ (chất trung tính).
Rửa sạch các bộ phận dưới vòi nước nóng, sạch và để hong khô tại nơi sạch sẽ.
- **Đầu phun**
Wash it with running water.

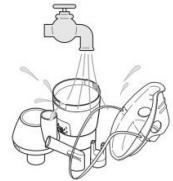

Các bộ phận không rửa được

- **Máy nén khí, ống dẫn khí PVC**
Lau sạch bằng vải mềm được làm ẩm cùng với nước và chất tẩy rửa nhẹ (chất trung tính).
- **Bộ lọc khí**
Không được rửa hay vệ sinh bộ lọc khí. Nếu bộ lọc khí bị ướt, hãy thay mới. Bộ lọc khí bị ẩm ướt có thể gây tắc nghẽn.

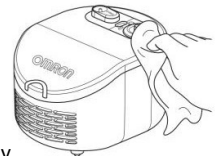

Khử trùng

Khử trùng các bộ phận mỗi tuần một lần. Nếu các bộ phận bị biến màu, hãy thay mới.

Để biết thêm thông tin "Vệ sinh và khử trùng" xem tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Cách sử dụng

1

Đảm bảo công tắc ở vị trí tắt (O)

Cắm phích cắm vào ổ điện □ □ □ □ □ □

2



Cho lượng thuốc đúng theo chỉ định vào cốc thuốc



3

Đặt nắp bình hít trở lại cốc thuốc.

Gắn ống dẫn khí & các bộ phận còn lại

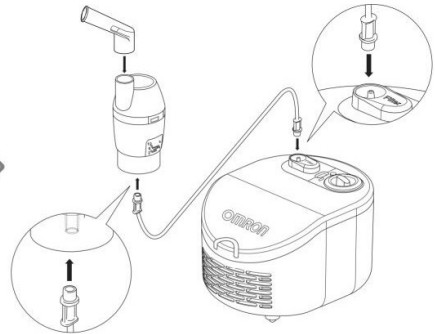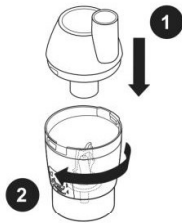

4

Bật công tắc ở vị trí (I) để bật máy.
Hít thuốc.

